

*Otto Bock*<sup>®</sup>

QUALITY FOR LIFE



**Una soluzione per tutte le esigenze**

**Comandi alternativi di guida**



### Comando soffio e succhio

Con la semplice combinazione di “succhi” o “soffi” (lievi pressioni o depressioni completamente svincolate dalla dinamica ventilatoria) è possibile gestire tutte le funzioni della carrozzina. Nella modalità “latched” è possibile con un comando far partire la carrozzina e proseguire poi la guida senza la necessità di altri input; è sufficiente correggere la direzione con semplici comandi singoli. In questa modalità è anche possibile accelerare e decelerare senza fermarsi.



### Comando a mento

Il comando completo può essere ruotato elettricamente fin dietro allo schienale. Movimento del joystick, ON/OFF e MODE sono gestiti con un piccolo joystick separato. La sensibilità del joystick è calibrabile direttamente dall'utente.



### Comando a piede

Può essere usato in modalità 3 o 5 pulsanti; la modalità “latched” rende il controllo della carrozzina più semplice. Possono essere gestite tutte le funzioni.



### Tastiera a 5 pulsanti Wafer

Grazie all'ampia superficie e l'alta sensibilità dei sensori, consente il controllo di tutte le funzioni oltre alla guida in modalità 5 pulsanti




### Comando a pulsanti


Con un solo sensore è possibile guidare, gestire la postura, l'ambiente e tutte le funzioni della carrozzina tramite scansione integrata nel display. Chi riesce a gestire 3 pulsanti, posizionati generalmente sul poggiatesta, può controllare in maniera molto semplice la guida, inoltre nella modalità “latched” può far partire la carrozzina che poi proseguirà automaticamente rendendo necessarie solo le eventuali correzioni di traiettoria.



### Mini-Joystick calibrabile

Il mini-joystick è un sensore di pressione e non ha alcuna escursione. Si attiva con pochissimi grammi di forza e può essere calibrato direttamente dall'utente in base alle sue abilità del momento. E' possibile impostare la sensibilità in ogni direzione visualizzando il grafico relativo alla forza impressa, direttamente sul display LCD

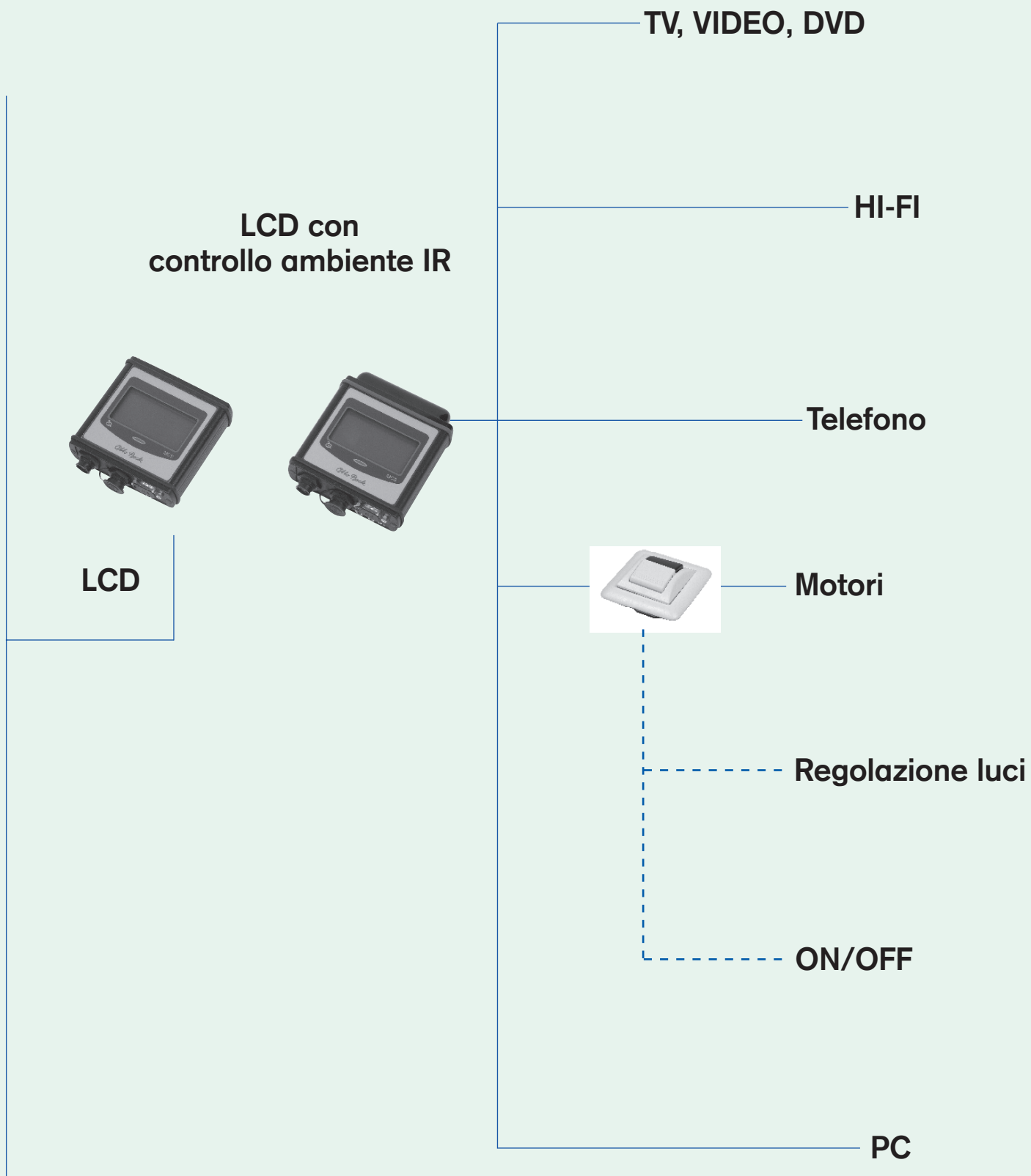

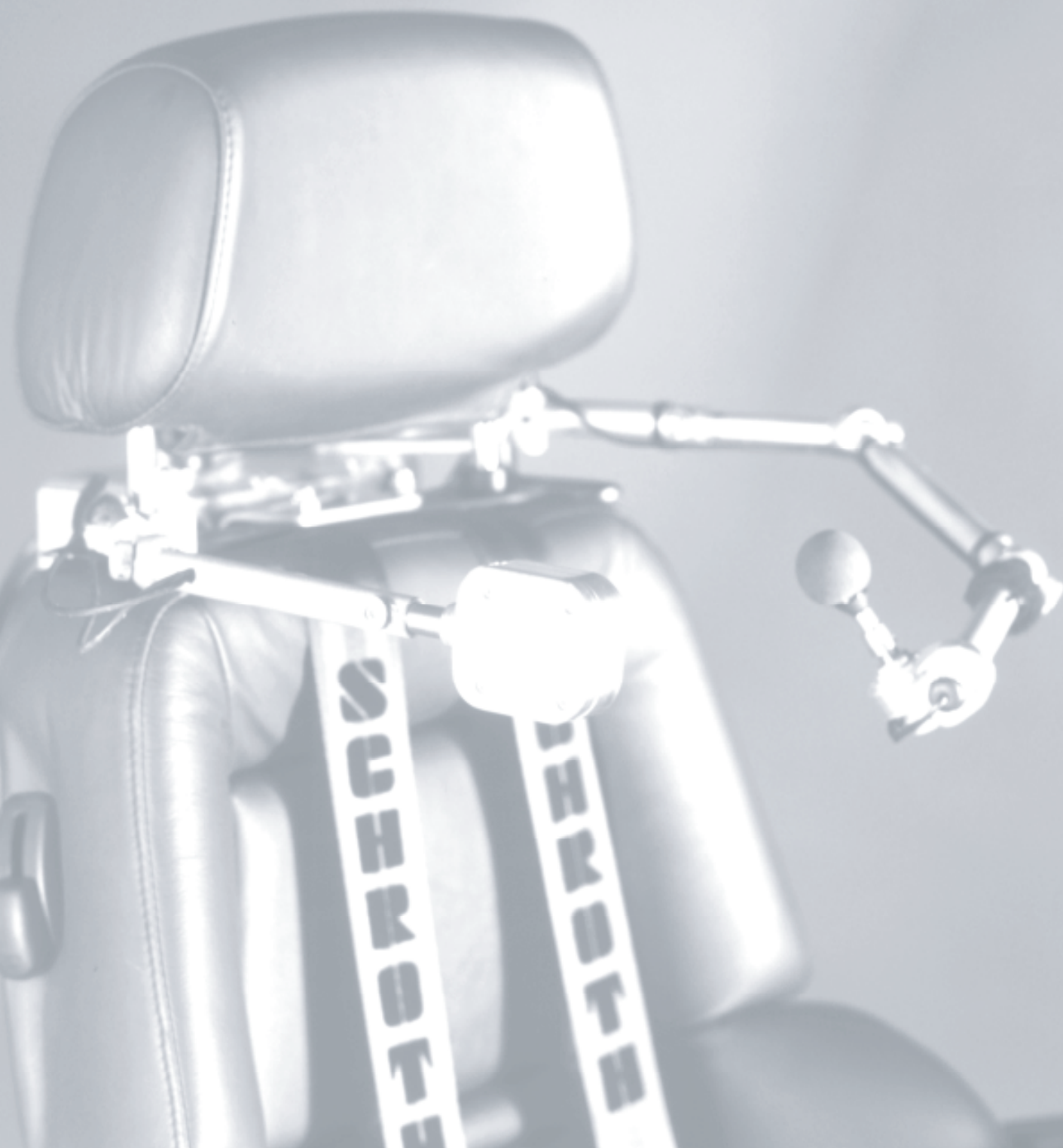

**Otto Bock®**

**QUALITY FOR LIFE**

**Otto Bock Italia S.r.l.**

Via Filippo Turati 5/7 · 40054 Budrio (BO)  
Tel. 051 69 24 711 · Fax 051 69 24 720  
reha.italia@ottobock.com · www.ottobock.it